



mooncop[®]

coppetta mestruale riutilizzabile
l'alternativa innovativa ai tamponi

Di cosa si tratta?

La Mooncup® è una coppetta in morbido silicone, che può essere riutilizzata per ogni ciclo mestruale. Posizionata all'interno della vagina, più in basso di un tampone, la Mooncup® raccoglie il sangue mestruale, non lo assorbe.

È facile da usare?

Inserita nel modo giusto, la Mooncup® è così comoda che nemmeno si sente. Forse inizialmente potrà essere necessaria un po' di pratica per posizionarla correttamente; però, una volta perfezionato l'inserimento, rimarrai meravigliata di come sia facile usarla. Dopo essere stata piegata e inserita in vagina, la Mooncup® si apre all'interno. Sarà necessario toglierla e svuotarla ogni 4-8 ore, secondo l'intensità del tuo flusso. Una volta tolta, risciacquala e asciugala, poi inseriscila di nuovo. Potrai sterilizzarla, facendola bollire, tra una mestruazione e l'altra.

Perché è migliore dei tradizionali tamponi "usa e getta"?

La Mooncup® è stata progettata da donne, tenendo in mente il tuo comfort e convenienza. Non c'è niente di sporco, nessun pericolo di perdite e la vagina mantiene sempre la sua naturale idratazione. Dato che è necessaria soltanto una Mooncup® per gestire tutto il ciclo mestruale, non soltanto potrai risparmiare, ma farai anche un concreto gesto ecologico.

La Mooncup® è prodotta in silicone ipoallergenico, quindi non interferisce con il delicato equilibrio dell'ambiente vaginale. Usando la Mooncup®, il tuo corpo non sarà a contatto con alcuna sostanza chimica; la Mooncup® è ideale anche quando viaggi, nuoti, fai attività fisica e durante la notte.

Non sei ancora convinta?

Inizialmente, forse, l'idea ti lascerà perplessa.

Ti chiederai: potrebbe essere sporca, scomoda o non igienica?

Si tratta di reazioni comuni, ma conviene fermarsi a riflettere.

La maggior parte delle donne è cresciuta in un periodo in cui non c'era alcuna alternativa ai prodotti igienici femminili "usa e getta"; questo fatto ha contribuito a definire il modo in cui consideriamo il tema delle mestruazioni. È sempre stimolante sperimentare idee nuove, specialmente in un campo così intimo. I vantaggi della Mooncup® sono troppi per essere ignorati!

Quale misura dovrei usare?

Esistono due misure, secondo la tonicità del pavimento pelvico:

Hai avuto bambini?	Hai meno di trent'anni?	Hai più di trent'anni?
No	Misura B	Misura A
Sì, un parto normale	Misura A	Misura A
Sì, con intervento cesareo	Misura B	Misura A

La Mooncup® è adatta a tutte le donne, anche quelle con pelle sensibile o che soffrono di allergie.

Le tacche di misurazione in millilitri ti aiuteranno a tenere sotto controllo il sangue perduto; ciò è particolarmente utile alle donne che soffrono di menorragia e che devono riferire al medico la quantità precisa di perdite.

Se hai o sospetti di avere una malattia ginecologica, consulta il tuo medico prima di usare la Mooncup®.

Durante la sua vita, una donna usa 10.000 assorbenti igienici o tamponi

A tuo vantaggio personale

- Non c'è niente di sporco, nessun pericolo di perdite né di secchezza vaginale.
- Progettata da donne per il tuo comfort e convenienza.
- Non sarai esposta a pesticidi, candeggina, sostanze chimiche.
- Si deve svuotare meno spesso di quanto sia necessario sostituire gli assorbenti o i tamponi.
- Non sono necessari prodotti di ricambio.
- Ottima per donne con pelle sensibile o che soffrono di allergie.

A vantaggio del tuo portafoglio

- Una Mooncup® dura diversi anni, quindi è il prodotto di igiene femminile più economico.

A vantaggio del pianeta

- Riutilizzabile per molti anni – basta risciacquarla e inserirla di nuovo.
- Non sono necessari tamponi o assorbenti che, una volta usati, devono essere inceneriti o gettati in discarica.
- Il prodotto per mestruazioni più ecologico sul mercato.

Testimonianze

“Nel passato soffrivo di forti dolori, ma ora sono spariti.

La Mooncup®, inoltre, non altera l'ambiente vaginale, a differenza dei tamponi che invece assorbono il muco vaginale protettivo. Questo è stato il periodo mestruale più piacevole che io abbia mai sperimentato”

Chiara

“La Mooncup® è comoda, discreta e facile da usare.

Io faccio molto sport e normalmente ero sempre imbarazzata quando avevo le mestruazioni perché sentivo il tampone o l'assorbente. Era una sensazione sgradevole – ora invece non vedo l'ora di nuotare, andare in bicicletta o fare equitazione, dato che veramente non mi sembra di avere le mestruazioni.

Grazie per avermi ridato la quarta settimana di ogni mese!”

Maria

“Sono molto felice di aver ricevuto la mia Mooncup® in tempo per le mestruazioni. Dato che ho sempre preferito gli assorbenti ai tamponi, ero meravigliata di quanto sia facile usarla.

Inoltre, è molto più igienica di quanto mi immaginassi.

La Mooncup® mi ha ridato l'indipendenza: mi sento più libera, più fresca e più tranquilla per il fatto che non contribuisco ad aumentare i rifiuti.”

Valentina

“Sono attivamente impegnata in un'associazione ambientalista.

Uso vestitini in fibre naturali per i miei figli, mangio cibo biologico, faccio la raccolta differenziata.

Già da tempo sentivo una contraddizione forte nel continuare a usare assorbenti usa e getta.

Saputo dell'esistenza della Mooncup®, l'ho acquistata senza indugi: sentivo che poteva essere un'ottima risposta al mio dilemma.

E così è stato. Ora posso dire che il mio impegno verso l'ambiente è davvero a 360 gradi”.

Ornella

Mooncup: come si usa

1



La tua Mooncup

2



Piegarla una volta

3




Piegarla due volte

4



Facile da inserire

5

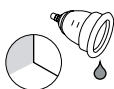

Svuotare ogni 4 - 8 ore

6



Risciacquarla o asciugarla e reinserirla

Se hai domande, dubbi e per assistenza tecnica sul prodotto:

assistenza@labottegadellaluna.it

Prodotta nel Regno Unito per Mooncup Ltd
Distribuito in Italia da: La Bottega della Luna srl

Stampato su carta riciclata

Acquista la Mooncup® dal tuo
rivenditore di fiducia

